



Standort Kiel:

Steenbeker Weg 33
24106 Kiel
Tel.: 0431-2 20 10-600
Fax: 0431-2 20 10-699

Standort Hamburg:

Stuvkamp 22
22081 Hamburg
Tel.: 040-38 64 57 60
Fax: 040-38 64 57 61

1. Vorbereitung:

Vor der Entnahme der Probe darf der Proband mindestens 30 Minuten weder Speisen noch Getränke zu sich nehmen.



2. Auspacken:

Öffnen Sie den eingeschweißten Tupfer an der rosa markierten Seite, um Berührungen mit dem Tupferkopf (kleine Bürste) auszuschließen. Greifen Sie den Abstrichtupfer stets fest an dem dicken Außenröhrchen.



3. Probenentnahme:

Bloßer Speichel ist als Material ungeeignet, deshalb müssen Sie sicherstellen, dass Sie mit der Abstrichbürste je 6mal fest an den Innenseiten beider Wangen entlang streifen.



4. Trockenphase:

Bevor Sie den Tupfer in das mitgelieferte Transportgefäß geben, muss dieser mindestens 2 Stunden an der Luft trocknen. Hierzu stellen Sie den Tupfer am besten vorsichtig, mit der Abstrichbürste nach oben, in ein Trinkglas.



5. Abwerfen des Tupfers

Nach der Trockenphase geben Sie den Tupferkopf in das mitgelieferte Transportgefäß. Hierzu halten Sie den Tupferkopf in das Röhrchen und werfen ihn ab, indem sie das dünne Ende des Halteröhrchens, wie bei einem Kugelschreiber, in das Außenröhrchen schieben.



6. Versand

Verschließen Sie das Transportröhrchen, beschriften Sie es mit Ihrem Namen auf dem beiliegenden Etikett und geben Sie es in die mitgelieferte Transporthülle.

Von jedem Probanden sind 2 Abstriche (2 Röhrchen) zu entnehmen.

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte verwenden Sie zur Probenentnahme nur den von uns erhaltenden Abstrichtupfer und vermeiden Sie den Kontakt zum Tupferkopf sowohl mit Fingern, als auch mit anderen Gegenständen, denn dies macht den Test unauswertbar.